

Вам понадобятся:

- 1. Корректор дистального прикуса Forsus™ E22 (арт. 885-143)
- или -
Корректор дистального прикуса Forsus™ L-Pin (арт. 885-126)
- 2. Стальные лигатуры (диаметр 0,008 дюйма)
- 3. Индивидуализированный аттачмент с петлей на нижнюю челюсть для фиксации толкателя Forsus™



1 Зафиксируйте аттачмент на нижней челюсти или верхней челюсти (в зависимости от плана лечения) так, чтобы часть петли, в которую будет упираться толкатель, была расположена вертикально в мезиальном направлении. Зафиксируйте ортодонтическую кнопку на зуб, расположенный дистально.



2 Сложите аттачмент и кнопку металлической лигатурой (диаметр 0,008 дюйма).



3 После подковыкания кнопки оставьте хвостик связанной лигатуры длиной 3 мм, после чего зафиксируйте его адгезивом к зубу.



4 Определите размер толкателя аппарата Forsus™. Измерьте расстояние от дистального края трубки верхнего моляра до мезиального края аттачмента Forsus™ (на указанном примере это значение равно 25 мм). Используйте линейку Forsus (арт. 807-014).



5 Установите пружинный модуль Forsus™ в трубку на первом моляре. Особенности установки модулей E22 и L-Pin смотрите на обороте.



6 Установите толкатель Forsus™. Инструкцию по установке смотрите на обороте.

Брекет-система Incognito™

в сочетании

с аппаратом Forsus™



Установка толкателя Forsus:

Для большей эстетики, рекомендуется устанавливать петлю толкателя на премоляры.

Пожалуйста, обратите внимание, что толкатель Forsus™ в наборе на 1 пациента имеет размер 25 мм. Другие размеры толкателей заказываются отдельно.

Лигирование:

Для предотвращения нежелательных поворотов, лигируйте брекеты, расположенные мезиальнее места крепления толкателя Forsus™.

Корректор дистального прикуса Forsus™

EZ2

Инструкция по установке



1 Удерживайте модуль EZ2 аппарата Forsus™ за мезиальный изгиб. Используйте щипцы Вейнгарта.



2 Установите модуль EZ2 в трубку на первом верхнем моляре. Направьте движение мезиально-дистальное, до щелчка.



3 Поместите петлю толкателя на петлю аттачмента Forsus™. Попросите пациента открыть рот, сожмите пружину и установите в нее толкатель.



4 Если при смыкании в центральной окклюзии толкатель выходит дистальной пружины, то значит, что он слишком длинный. Используйте более короткий толкатель.



5 Зафиксируйте мезиальную часть толкателя, скрепя его петлю вокруг галта аттачмента.



6 При необходимости повторной активации установите на толкателе дополнительное стопорное кольцо дистальнее стопора и зажмите его.

Корректор дистального прикуса Forsus™

EZ2

Инструкция по снятию



1 Попросите пациента открыть рот, сожмите пружину и извлеките толкатель.



2 Удерживая дистальную часть модуля EZ2 щипцами Вейнгарта, извлеките модуль из трубки.



3 Удерживая дистальный конец толкателя пальцами, щипцами Вейнгарта разогните петлю.

Корректор дистального прикуса Forsus™

L-Pin

Инструкция по установке



1 Установите L-Pin в ушко пружинного модуля. Обратите внимание, что головка L-Pin должна находиться с щечной стороны.



2 Установите модуль L-Pin в трубку на первом верхнем моляре с дистальной стороны.



3 Загните L-Pin вокруг трубки, как показано на рисунке. Примечание: чтобы избежать ограничения движения аппарата, оставьте зазор 1–2 мм между дистальным концом трубки и головкой L-Pin модуля.

Корректор дистального прикуса Forsus™

L-Pin

Инструкция по снятию



1 Разогните L-Pin модуль, как показано на рисунке. Извлеките L-Pin из трубки.

3M Unitek

Ортодонтическая продукция
3M Россия
121614, Москва, ул. Крылатская, 17, стр. 3
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»
Тел.: +7 (495) 784 7474 (многоканальный)
Тел.: +7 (495) 784 7479 (сай-центр)
Факс: +7 (495) 784 7475
www.3Munitek.ru

3M, Forsus и Insignito являются зарегистрированными торговыми марками компании 3M.

© 3M 2014. Все права защищены.